




Instruktion

RoyalBath
SWEDEN


www.RoyalBath.se

RB-1025

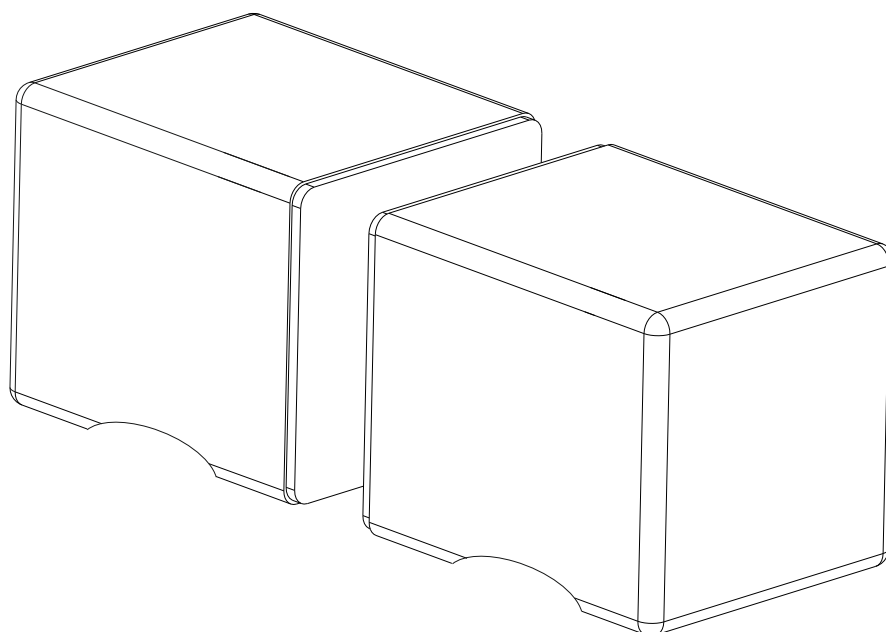

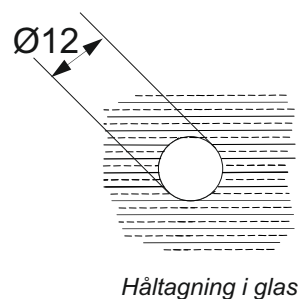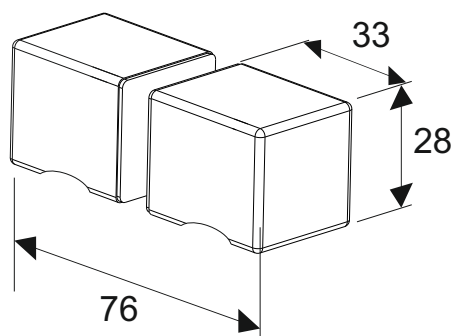

Montering

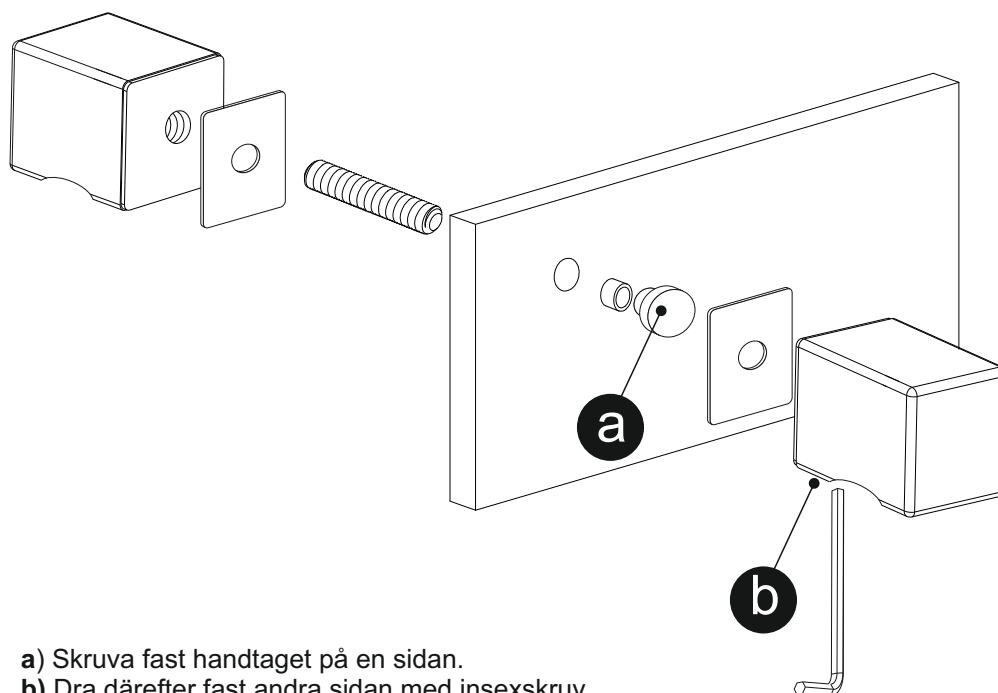

- a) Skruva fast handtaget på en sidan.
b) Dra därefter fast andra sidan med insexskruv

Användning

- Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och golv och inte rör sig.
- Använd inte produkten om skador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- Rengör delar med milda rengöringsmedel. **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.